



ConvaTec



Esteem™ 

Mogućnosti
jednodijelnog stoma sustava


Jednostavno • Sigurno • Uspješno



Esteem⁺ je stoma sustav koji je jednostavan za uporabu, što život sa stomom čini lakšim i udobnijim. Združuje podlogu i vrećicu u jednu cjelinu, za sigurnost u samo jednom koraku.

Dostupne su kolo zatvorena vrećica i ileo vrećica s ispustom.

Sada i sa unaprijeđenom koristi koju donosi nova ConvaTec⁺ linija vrećica!

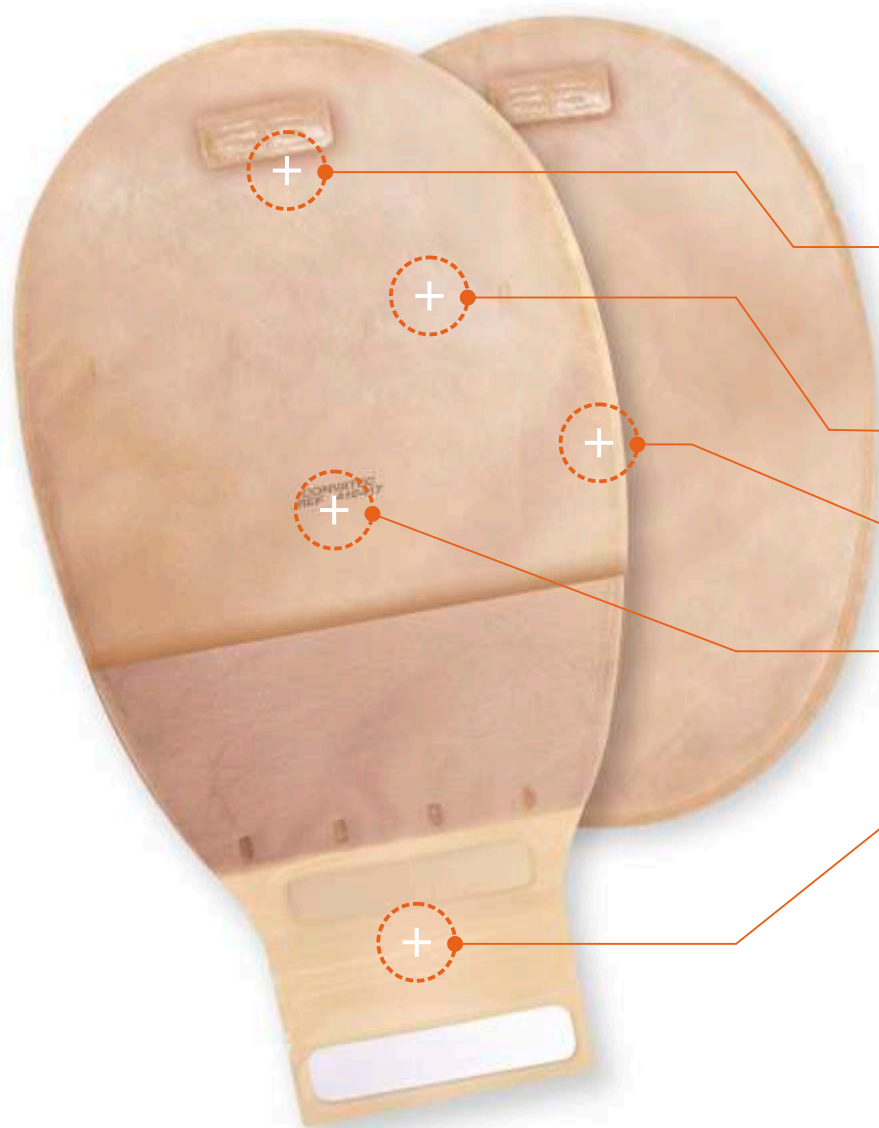

Esteem⁺ odlike:

Vrlo djelotvoran filter

■ Smanjuje mogućnost začepljenja i time produžuje djelovanje, održavajući vrećicu plosnatom, uz istovremeno bitno smanjenje neugodnih mirisa.

Udobna tkanina

■ Mekana i glatka tkanina uz tijelo, otporna na vodu.

Elegantan oblik

■ Inovativan i elegantan, zaobljen izgled, za dodatnu udobnost i diskreciju.

Lako uočljiv kod

■ Kodni broj proizvoda otisnut je na vrećici, radi bržeg prepoznavanja.

Diskretan sustav zatvaranja

■ Džepić na InvisiClose[®] vrećicama skriva presavinuti ispust vrećice, radi veće sigurnosti i udobnosti pri korištenju vrećica s ispustom.

Kako koristiti

Esteem⁺ jednodijelni sustav

Korak 1: Priprema za novi početak

Započnite s čišćenjem kože oko stome s blagim sapunom i vodom (sapuni bez sadržaja ulja ili krema). Isperite i dobro posušite kožu.



Korak 2: Određivanje pravilne veličine

Izmjerite stomu i odaberite pogodnu veličinu podloge.

■ Za podloge koje se izrezuju:

Iscrtajte veličinu stome na prozirnoj zaštitnoj naljepnici podloge i izrežite otvor koji će za cca 3 mm biti veći od iscrtanog oblika stome.


■ Za već izrezane podloge:

Izaberite podlogu s već izrezanim stoma otvorom, koji je neznatno veći od promjera stome.



Korak 3: Uklanjanje prozirne zaštitne naljepnice


Uklonite prozirnu zaštitnu naljepnicu s podloge, povlačenjem pomoću plavo označene ušice.

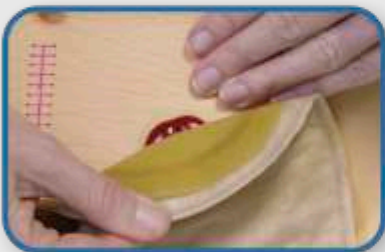

Korak 4: Primjena sustava na kožu

Nježno postavite otvor podloge u položaj iznad stome.

Potisnite podlogu na kožu. Prstima zagladite unutar rub podloge koji je najbliži stomi i zadržite potisak u trajanju od 30 sekundi, kako biste osigurali dobro pijanjanje podloge na kožu.

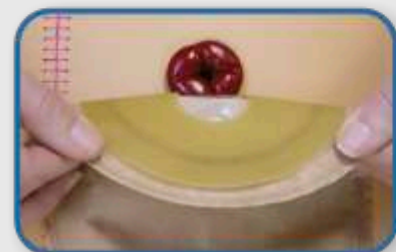

Korak 5: Uklanjanje sustava

Pridržite kožu jednom rukom i nježno odlijepite podlogu s drugom rukom, pokretom od kože i prema dolje.

ConvaTec Rupčići za uklanjanje ljepljivosti mogu se koristiti kao pomoć u uklanjanju podloge i mogućih ostataka ljepljivosti na koži.

Prikaz kako koristiti Invisiclose® sustav za zatvaranje vrećica

džepić **A** _____
dva međuspojna zatvarača **B** _____
dvije trakice na rubu ispusta vrećice **C** _____

Zatvaranje ispusta vrećice

Korak 1:



Držeći bijele trakice smještene na rubu ispusta vrećice presavinite ispust vrećice tri puta, pokretom odozdo prema gore, sve dok se međuspojni zatvarači ne preklope jedan preko drugoga.

Korak 2:



Pritisnite međuspojne zatvarače jedan uz drugi, sve dok ne osjetite da su se pravilno spojili i to u cijeloj dužini.

• Koristeći dva prsta kliznite cijelom dužinom spoja. Ovime osiguravate da spoj bude ravnomjeran i da nema nespojenih međuprostora.

Neobvezni postupci za dodatnu diskreciju i sigurnost:

Korak 3:



Stavite palce u džepić i kažiprstima pridržite presavinuti ispust vrećice.

Korak 4:



Izokrenite džepić iznutra prema van i smjestite presavinjeni ispust vrećice u džepić.

Pražnjenje vrećice



Korak 1:

Preokrenite džepić da otkrijete presavijeni ispust vrećice.



Korak 2:

Otvorite međuspojni zatvarač, započevši s njegovog ugla, i odmotajte presavijeni ispust vrećice 3 puta.



Korak 3:

Kako bi ispuštanje i/ili čišćenje vrećice bilo što lakše otvorite rub ispusta vrećice tako da oba kraja bijelih rubnih trakica stisnete palcem i kažiprstom.

Ispust vrećice možete očistiti blagim sapunom i vodom.

Esteem™ 
VREĆICE

naziv	promjer (mm)	kom/pak	kod za naruč.
Esteem+ colo samoljepive vrećice	20-70	30	416701
Esteem+ ileo samoljepive vrećice-invisiclose	20-70	10	416719