

Napredno promišljanje o skrbi za pacijenta

Služi Vam da:

Snizi rizik oštećenja kože

Snizi rizik infekcije

Osigura značajan iskorak u skrbi za pacijenta

FlexiSeal[®]
FMS



Silovit napredak u zbrinjavanju fekalne inkontinencije

NAMJENJENO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

ConvaTec



NOVI Flexi-Seal FMS služi
rješenju problema
vezanih uz fekalnu inkontinenciju.

NOVI Flexi-Seal FMS je
jednostavan i lagan
za uporabu.

1



Uvođenje

Prikladni džepić služi
pravilnom uvođenju
retencijskog balona.



2



Punjenje (inflacija)

Retencijski balon
jednostavno se napuni,
uporabom vode ili
fiziološke otopine.



3



Zamjena

Vrećice za feces izmjenjuju
se po potrebi i na lagan način.

4



Uklanjanje

Za potrebe uklanjanja jednostavno se ispuhne
retencijski balon. (Na mjestu primjene
ne smije ostati dulje od 29 dana.)

411100
411101

FLEXI-SEAL SET (1 x 1 kom)
FLEXI-SEAL VREĆICE ZA FECES (1 x 10 kom)

 **Stoma medical**

Stoma medical d.o.o., Frana Folnegovića 1c / VIII, 10000 Zagreb
TEL: 01 / 5508-999 • FAX: 01 / 6177-217
prodaja i savjetovalište: Ozaljska 148 , 10110 Zagreb, TEL: 01 / 3015-949
www.stoma-medical.hr

