

**Versiva<sup>®</sup> XC<sup>®</sup>**  
Gelling Foam Dressing

**AQUACEL<sup>®</sup> Agi**  
Hydrofiber<sup>™</sup> Dressing with Silver

**AQUACEL<sup>®</sup>**  
Hydrofiber<sup>™</sup> Wound Dressing

NAMIJENJENO  
ZDRAVSTVENIM  
RADNICIMA




**Osmišljeni da djeluju zajedno**



# Djelotvorna KOMBINACIJA

Versiva<sup>®</sup> XC<sup>®</sup> sadrži Hidrofiber<sup>®</sup> tehnologiju, te je stoga jedina sekundarna obloga posebno dizajnirana da poboljša djelovanje AQUACEL<sup>®</sup> i AQUACEL<sup>®</sup> Ag obloga.

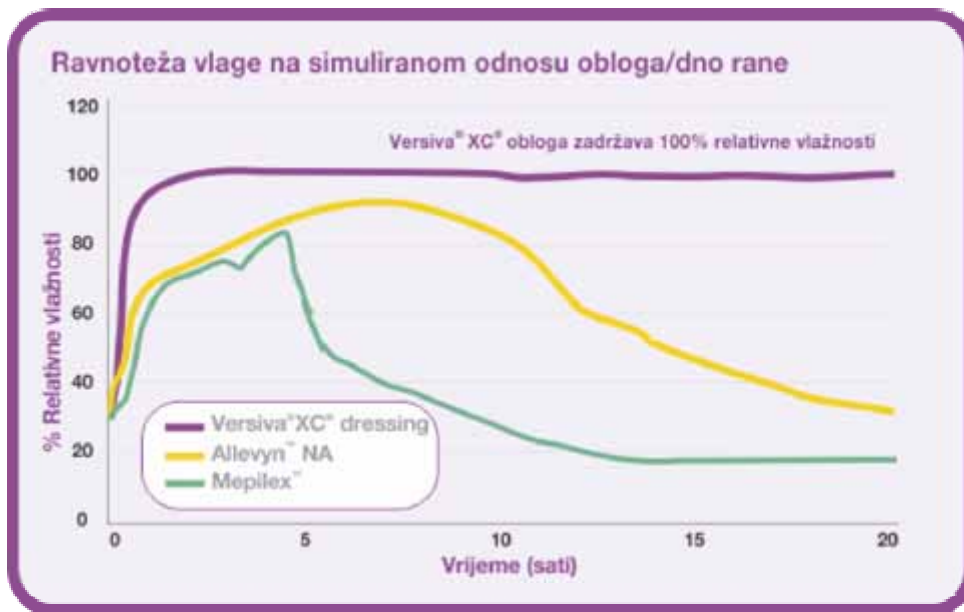

Zadržavajući ranu i primarnu oblogu vlažnom, potiče cijeljenja rane.

Hidrofiber<sup>®</sup> tehnologija u Versiva<sup>®</sup> XC<sup>®</sup> oblozi omogućuje retenciju eksudata, čime se doprinosi smanjenoj evaporaciji vlage. Tako se zadržavaju optimalni uvjeti vlažnog cijeljenja rane.

Versiva<sup>®</sup> XC<sup>®</sup>, zajedno s AQUACEL<sup>®</sup> i AQUACEL<sup>®</sup> Ag<sup>\*</sup> oblogama, čini efikasnu kombinaciju hidrofiber obloga za tretman različitih veličina i dubina rana, te količina eksudata.

EKSUDACIJA	Plitke rane	Rane s kavitetom
Suho		
Slaba eksudacija		
Jača eksudacija		
Jaka eksudacija*		
Izrazito jaka*		

\*Za saturirane i rane koje cure upotrijebiti više slojeva AQUACEL<sup>®</sup> / AQUACEL<sup>®</sup> Ag obloga

\*\*Upotrijebiti AQUACEL<sup>®</sup> Ag ako je rana inficirana ili ima visoki rizik od infekcije

## Upute za uporabu \*\*

1. Izabrati veličinu i oblik obloge prikladno anatomskoj lokaciji rane, na način da je upijajući sloj obloge veći od promjera rane.
2. Pri odstranjivanju obloge iz sterilne zaštite treba izbjegavati kontakt prstiju sa dijelom obloge koji se aplicira na ranu.
3. Pri uporabi ljepljive verzije, rukom lagano zadržati ljepljivi dio u trajanju od jedne minute kako bi osigurali bolje prijanjanje.
4. Prilikom izmjene Versive® XC®, uvijek treba obratiti pažnju na količinu natopljenosti obloge eksudatom kako bi ocijenili je li potrebno smanjiti ili povećati ritam izmjene obloge.
5. Kada rana više nema znakova infekcije ili kada se smanji eksudacija, a rana postane plitka, dovoljno je primjeniti samo Versivu® XC® kao primarnu oblogu.

\*\*Molimo proučite Uputu za uporabu obloge priloženu pakiranju.

## Duboka rana s kavitetom



Ranu isprati fiziološkom otopinom i okolinu rane dobro posušiti.



Nakon toalette kavitet treba natamponirati Aquacel® ili Aquacel® Ag trakicama, ostaviti barem 2 cm izvan rane.\*



Izabrati veličinu i oblik tako da je upijajući sloj obloge veći od promjera rane.



Upijajući jastučić Versive® XC® namjestiti centralno na ranu, a ljepljivi rub obloga nježno zalijepiti za okolno tkivo.

\* U kontaktu s eksudatom traka će nabubriti i zapuniti ranu.

## Plitka rana bez kaviteta



Ranu isprati fiziološkom otopinom i okolinu rane dobro posušiti.



Na defekt tkiva primarno staviti Aquacel® ili Aquacel® Ag oblogu 1 cm veću od ruba rane.



Izabrati veličinu i oblik obloge prikladno anatomskoj lokaciji rane, na način da je upijajući sloj obloge veći od promjera rane.



Upijajući jastučić Versive® XC® položiti centralno preko rane, ljepljivi rub nježno zalijepiti, a neljepljivi fiksirati i osigurati.

# Hidrofiber® tehnologija paleta proizvoda

Versiva® XC,® AQUACEL® i AQUACEL® Ag obloge za rane su dostupne u širokoj paleti proizvoda, pakiranja i veličina. Mogu se rezati u potrebnu veličinu i oblik, zadržavajući sve benefite Hidrofiber® tehnologije.

## Versiva® XC®

dimenzije (cm)	pak. (kom)	ConvaT. kod	šifra HZZO
<b>neljepljiva</b>			
7,5 x 7,5 cm	10	410606	021203110701
11 x 11 cm	10	410607	021203110801
15 x 15 cm	5	410608	021203110801
20 x 20 cm	5	410614	021203110801
<b>ljepljiva</b>			
10 x 10 cm	10	410609	021203110801
14 x 14 cm	10	410610	021203110801
19 x 19 cm	5	410615	021203110801
22 x 22 cm	5	410611	021203110801
18,5 x 20,5 cm (peta)	5	410612	021203110801
21 x 25 cm (trtica)	5	410613	021203110801

## AQUACEL®

dimenzije (cm)	pak. (kom)	ConvaT. kod	šifra HZZO
5 x 5 cm	10	177901	021203110701
10 x 10 cm	10	177902	021203110801
15 x 15 cm	5	177903	021203110801
2 x 45 cm (traka)	5	403770	021203110901

## AQUACEL® Ag

dimenzije (cm)	pak. (kom)	ConvaT. kod	šifra HZZO
5 x 5 cm	10	403706	021203111001
10 x 10 cm	10	403708	021203111101
15 x 15 cm	5	403710	021203111101
20 x 30 cm	5	403711	021203111101
2 x 45 cm (traka)	5	403771	021203111201

Ukoliko želite više informacija o ovim i sličnim proizvodima na osnovu Hidrofiber® tehnologije, te njihovog utjecaja na cijeljenje rana, posjetite [www.hydrofiber.com](http://www.hydrofiber.com)

## Očekujte više...

...djelotvorna kombinacija Versiva® XC®,  
AQUACEL® i AQUACEL® Ag obloga

### References

1. Retention of fluid under compression of non-adhesive versions of Versiva® XC® vs. Allevyn™, Biatain™ and Mepilex™. WHRI2932 TA110. November 28, 2006. Data on file, ConvaTec.
2. Comparison of moisture balance at a simulated wound dressing/bed interface between Versiva® XC® and a foam dressing. WHRI3248 TA176 June 22 2009. Data on file, ConvaTec.

Versiva, Versiva XC, AQUACEL and Hydrofiber are trademarks of ConvaTec Inc. AP-010343-GB